

UnbornHeart™ Ντόπλερ Εμβρύου και Εφαρμογή Κινητού – Συνοπτικός οδηγός

Εγκαταστήστε τη δωρεάν Εφαρμογή (iPhone, iPad, στα περισσότερα Android τηλέφωνα και tablets). Μπορείτε να βρείτε τους Συνδέσμους Λήψης της Εφαρμογής στο Apple App Store και στο Google Play στο www.unbornheart.com.



Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Τοποθετήστε τα μαλακά στοιχεία των ακουστικών. Συνδέστε τα ακουστικά στο Ντόπλερ και φορέστε τα ακουστικά.



Συνδέστε το άκρο “DOPPLER” του καλωδίου του smartphone στο Ντόπλερ. Συνδέστε το άκρο “PHONE” στην υποδοχή ήχου της κινητής συσκευής σας.



Ενεργοποιήστε την Κατάσταση πτήσεων στην κινητή συσκευή σας. Ξεκινήστε την Εφαρμογή UnbornHeart. Απλώστε αρκετή ποσότητα gel υπερήχων στη γυμνή κοιλιά σας. Ενεργοποιήστε το Ντόπλερ και είστε έτοιμοι να αρχίσετε να παρακολουθείτε το μωρό σας. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο εγχειρίδιο και το τμήμα “βοήθεια” της Εφαρμογής.

Μετά τη χρήση: Απενεργοποιήστε το Ντόπλερ και σκουπίστε το ζελέ υπερήχων από το Ντόπλερ με ένα μαλακό ύφασμα.

Το UnbornHeart Ντόπλερ Εμβρύου είναι μια εγκεκριμένη CE συσκευή με EU MDD IIa και FDA class II κατατάξεις ιατρικής συσκευής. Τα προϊόντα UnbornHeart δεν προορίζονται να είναι υποκατάστατα των επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών ή διαγνώσεων. Αν έχετε οποιοσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την υγεία του εμβρύου σας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή τη μαιία σας.

Το Εμβρυϊκό Ντόπλερ UnbornHeart έρχεται με εγγύηση ενός έτους.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις στο www.unbornheart.gr